

Совершенная лазерная система  
**SLIM EVOLUTION II**

Уникальные технологии на страже  
красоты и женского здоровья



# Лазерный аппарат SLIM EVOLUTION II

на страже красоты и женского здоровья

Более чем за полувековую историю лазерные технологии прочно вошли во многие сферы медицины, такие как гинекология, косметология и хирургия.

**Клинически доказано** благоприятное воздействие лазерного излучения на микроциркуляцию в организме, обменные, восстановительные и другие процессы. Проблемы, которые раньше решались оперативным путем, теперь можно устранить с помощью щадящих малоинвазивных процедур.

**В результате** лазерные системы, повышающие качество жизни, завоевали огромную популярность. Особенно такие технологии востребованы в гинекологии, потому что позволяют легко решить многочисленные проблемы женского здоровья.

Таким образом, **лазерные аппараты становятся стандартом оснащения**. Без данного оборудования сложно полноценно предоставлять гинекологические услуги высокого качества.



- ✔ **ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ** в связи с большим количеством показаний к применению лазерного аппарата.
- ✔ **ПОПУЛЯРНОСТЬ МЕТОДИКИ**, которая возрастает из-за стремительного распространения информации о технологии и отзывов о положительных результатах среди женщин.
- ✔ **ВЫСОКАЯ ОКУПАЕМОСТЬ** лазерной системы в связи с высокой стоимостью одной процедуры, необходимостью курсового лечения и возможностью использования одного аппарата в разных областях медицины (гинекология, косметология, дерматология, хирургия).
- ✔ **ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**, заметный уже после первой процедуры.
- ✔ **РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ПАЦИЕНТОК**, для каждой из которых существуют свои показания, например, недержание мочи в пред- и постклимактерическом периодах, послеродовые рубцы у молодых женщин.
- ✔ **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛИЕНТСКИЕ ПОТОКИ** к другим специалистам клиники.

# Почему лазерная система **SLIM EVOLUTION II**

- ✓ УНИКАЛЬНЫЕ ПАТЕНТОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ V-LASE в гинекологии и Z-алгоритм в косметологии, которые обеспечивают быстрый и видимый эффект, а также минимальный период реабилитации.
- ✓ ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО, которое подтверждается наличием международных и российских сертификатов качества.
- ✓ ОПТИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АППАРАТА, доступная для большинства клиник, выделяет лазерную систему среди европейских аналогов.
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ МЕДИЦИНЫ: косметология, дерматология, хирургия, отоларингология.
- ✓ КЛИНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ на рабочем месте врача позволяет полноценно и в короткие сроки освоить методику работы с лазером.
- ✓ СЕРТИФИКАЦИЯ персонала клиники на базе Государственного Научного Центра Лазерной Медицины ФМБА России им. Скобелкина с получением диплома государственного образца.
- ✓ МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА по продвижению процедуры на рынке медицинских услуг, заключающаяся в подготовке для клиник макетов рекламных материалов и моделей экономической окупаемости.
- ✓ ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, в которое входит полный комплекс услуг по обслуживанию медицинского оборудования и консультированию персонала клиники.
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПКИ ОБОРУДОВАНИЯ В ЛИЗИНГ с индивидуальным подходом к рассмотрению каждой заявки.



Компания Lasering (США/Италия) является лидером рынка лазерного оборудования и разрабатывает новейшие технологии и методы лечения.




# Вагинальное омоложение: запатентованная технология V-LASE

Женская репродуктивная система является одной из самых незащищенных и «хрупких» во всем организме. Восстановительный период после родов, возрастные изменения и другие гинекологические нарушения приводят к последствиям, которые рано или поздно побуждают женщин отправиться на консультацию к специалисту и пройти лечение.

Выбирая между множеством методик, пациентки останавливаются на современных и эффективных процедурах. **SLIM EVOLUTION II** – это единственный лазер, сочетающий глубокое **термическое воздействие CO<sub>2</sub> лазера** на ткани и технологию **V-LASE**, которая позволяет проводить неинвазивную процедуру **без периода реабилитации**.

В большинстве систем для вагинального омоложения других производителей используются фракционные импульсные режимы, которые стимулируют новый collagen и эластин за счёт заживления травмы. Однако данный метод более актуален для косметологии, поскольку эпидермис лучше переносит эту процедуру.

Что касается гинекологии, то подслизистые и слизистые оболочки нуждаются в более щадящем воздействии, поэтому компания Lasering (США/Италия) разработала и запатентовала неабляционную технологию **V-LASE** на основе лазера CO<sub>2</sub>. За счёт сильного термического прогрева и отсутствия повреждения слизистой удаётся добиться наилучшего результата по подтяжке тканей и стимулированию образования нового коллагена.

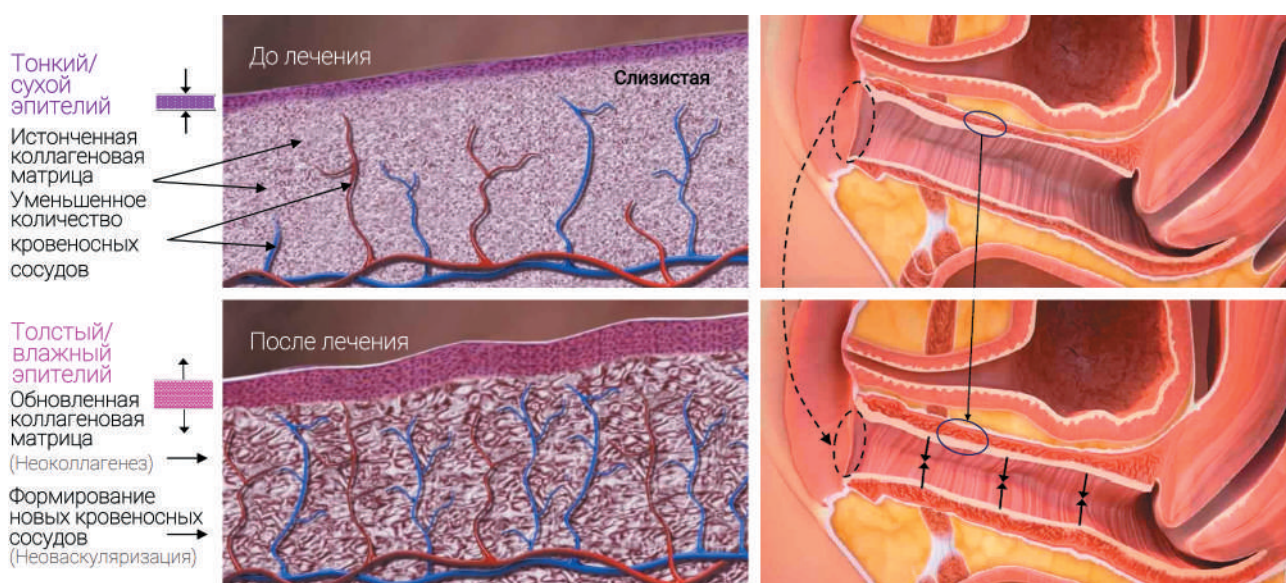

# Лазерная реконструкция на уникальном аппарате **SLIM EVOLUTION II**

позволяет решить деликатные проблемы здоровья интимной сферы без оперативного вмешательства и приёма гормональных препаратов.

## Показания:

### ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ РОДОВ:

- ✔ «Эффект релаксирующего влагалища».
- ✔ Послеродовые рубцы.
- ✔ Коррекция дефектов внешних половых органов.

### ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:


- ✔ Сексуальные дисфункции (снижение либидо).
- ✔ Лечение вагинальной атрофии, восстановление нормального физиологического состояния влагалища в пред- и постклимактерическом периодах.
- ✔ Инволютивные изменения кожи больших половых губ и промежности (дряблость, нарушение пигментации, сухость).
- ✔ Цистоцеле (грыжа мочевого пузыря, выпячивание его в вагинальную полость).

### ДРУГИЕ:


- ✔ Стрессовое недержание мочи в любом возрасте.
- ✔ Коррекция начальной стадии пролапса тазового дна.
- ✔ Лечение крауроза влагалища, лейкоплакии.
- ✔ Удаление новообразований, лечение эрозии.



# Эстетическое восстановление кожи с запатентованным Z-алгоритмом **MiXto**

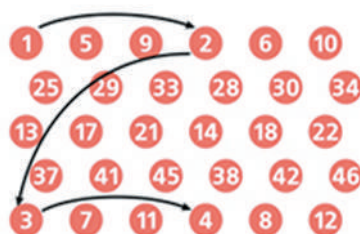

Фракционный режим

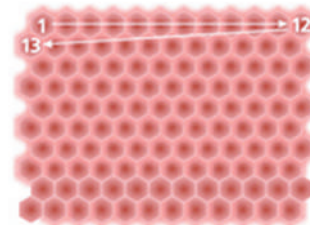

Традиционный режим

Наша кожа постоянно находится под воздействием негативных факторов, что сильно отражается на её качестве. Агрессивные солнечные лучи, неблагоприятная экологическая обстановка и другие условия внешней среды, а также резкие скачки веса, возрастные и мимические изменения приводят к появлению морщин, растяжек, различных новообразований и пигментации. Проблемы такого рода **актуальны для людей разного возраста.**

Процедуры на лазерном аппарате **SLIM EVOLUTION II** – это эффективная услуга, востребованная среди клиентов во всем мире. Данное оборудование помогает добиться хороших результатов **без оперативного вмешательства** за счёт уникальной технологии MiXto с запатентованным Z-алгоритмом и технологией стабилизации импульса CHOPPED CW.

Z-алгоритм делит область воздействия на четыре квадранта, в результате чего тепловая нагрузка равномерно распределяется на коже. Технология CHOPPED CW работает в режиме длительного импульса. Кроме специального принципа сканирования Z-алгоритма учитывается время термической релаксации кожи, то есть промежуток времени, необходимый для отвода тепла без повреждения биоткани. Таким образом, процедура проходит практически безболезненно с минимальным сроком реабилитации. В этом заключается главное отличие от остальных фракционных сканеров.

Изменение размеров пятна (от 5x5 мм до 20x20 мм) и плотности воздействия (от 5% до 40%) даёт возможность регулировать агрессивность воздействия и степень повреждения в зависимости от клинического протокола. Индивидуальная настройка параметров работы позволяет добиться хороших результатов.

Аппарат является универсальным и подходит для применения **на всех зонах**: лицо, руки, глаза, щеки, шея, локти и другие. Таким образом, врач может проводить процедуру на любых участках лица и тела, что увеличивает частоту использования устройства и ускоряет его окупаемость.

Минимальный риск рубцевания и возникновения гиперпигментации делает процедуру ещё более привлекательной в глазах потенциальных клиентов. Также отсутствует необходимость использовать анестезию в каждом клиническом случае. Этот вопрос обсуждается индивидуально до начала процедуры.

## Показания:

- ✓ Мимические и глубокие морщины.
- ✓ Пигментация кожи (дисхромия).
- ✓ Снижение тонуса и тургора кожи.
- ✓ Шрамы после акне.
- ✓ Фотостарение.
- ✓ Хроностарение.
- ✓ Рубцы.
- ✓ Растяжки, стрии.
- ✓ Новообразования различной этиологии.



Морщины: 4 месяца после одной процедуры



Безоперационная блефаропластика

## Аппарат можно дооснастить насадками для хирургии



Длиннофокусный  
наконечник



Полый  
наконечник



Наконечник для удаления  
новообразований

# Компания «Фуджитора» – официальный поставщик оборудования компании Lasering (США/Италия) в России

«Фуджитора» – это команда единомышленников, влюбленных в общее дело. Все отделы компании слаженно взаимодействуют, что позволяет добиться высокой продуктивности и эффективности в работе. Мы индивидуально работаем с каждым заказом вне зависимости от его объема и гарантируем максимальное качество обслуживания всем клиентам.

Более чем за 10 лет работы мы завоевали репутацию надежного поставщика медицинского оборудования от производителей с мировым именем. Мы делаем всё, чтобы у наших клиентов была полная информация о тех возможностях, которые они получают при покупке сложного высокотехнологичного оборудования.

Мы искренне рады сотрудничать со всеми, кто готов развивать медицинский бизнес!



125040, Москва, ул. Скаковая, д. 36

Тел./факс: +7 (495) 665-06-63

E-mail: [info@fujitora.com](mailto:info@fujitora.com)

[www.fujitora.com](http://www.fujitora.com)

